

JMC

通気性

視える

看える

洗える

快適性

診える

痒いところに
手が届く



OPENCAS





OPENCAST

使用例

■ 上肢

■ 下肢

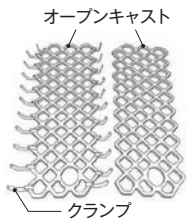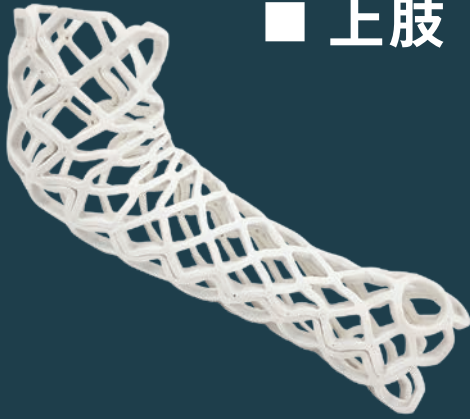


1.
1枚のオープンキャストの両側にクランプを取り付けます。



2.
オープン等でオープンキャストを2枚とも加熱します。



3.
皮膚を保護するため、適当な幅と間隔でストッキングネットを巻きます。

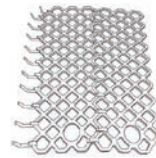

4.
加熱された2枚のオープンキャストをクランプで結合します。



5.
患部に巻き付け、クランプで固定しながら形状を整えます。



6.
透明ラップなどを巻き付けオープンキャストが固まるのを待ちます。




7.
透明ラップを除去し、オープンキャストの隙間からストッキングネットを除去します。



8.
ギブス完成

OPENCAST size

Product code	幅×長さ×厚さ[mm]
CM-03	131 x 342 x 9.0
CM-04	148 x 390 x 10.0
CM-05	167 x 454 x 10.0
CM-06	183 x 478 x 10.5
CM-07	203 x 527 x 10.5
CM-08	228 x 583 x 10.5

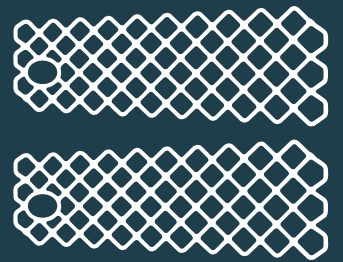

販売名: オープンキャスト

製品名: OPENCAST

ClassI 一般医療機器

一般的名称: ギブス包帯

医療機器届出番号: 14B1X10020000002

【製造販売元】

株式会社 JMC

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-5

TEL 045-273-3410

FAX 045-471-5270

MDM20190711-001T

【販売元】